

**ИНСТРУКЦИЯ по применению
ДИЛАТОР (РАСШИРИТЕЛЬ) ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ «РЦ - БИОМЕДИКАЛ»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Дилатор (расширитель) цервикальный цилиндрический одноразовый стерильный «РЦ - Биомедикал» (далее по тексту – «расширитель») предназначен для бережной подготовки шейки матки к родам, или для досрочного прерывания беременности, а также для расширения шейки матки перед внутриматочными вмешательствами. Расширитель может быть использован в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Расширители выпускаются длиной 70 мм и диаметром 4 мм. Расширители выпускаются в стерильном виде в индивидуальных упаковках. Индивидуальная упаковка расширителей должна быть герметичной. Стерилизация осуществляется радиационным методом дозой 15 - 40 кГр по ГОСТ Р ИСО 11137 – 2.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Инфекции половых путей. В этих случаях необходима предварительная санация.
- Повышенная чувствительность к материалу.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием по назначению проводят визуальный осмотр каждой упаковки. Запрещается использовать расширитель в следующих случаях:

- если истек срок годности данной партии
- если нарушена целостность упаковки
- если упаковка находится во влажном состоянии

При отсутствии нарушений упаковку вскрывают с соблюдением мер асептики, выкладывают расширитель на «стерильный стол»

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Введение и удаление расширителя — врачебная манипуляция.

1. Попросите пациентку опорожнить мочевой пузырь.
 2. Введите влагалищное зеркало и обработайте шейку матки и влагалище антисептическим раствором.
 3. При необходимости зафиксируйте шейку матки щипцами.
 4. Зафиксируйте расширитель зажимом в широкой части и медленно, без лишних усилий, продвигайте в канал шейки матки до появления ощущения "провала" (расширитель вышел за границу внутреннего зева матки)
 5. Широкая часть расширителя (ручка) должна оставаться перед наружным зевом матки.
 6. Через 5-8 мин происходит разбухание расширителя однородное и равномерное.
 7. Расширитель не должен находиться в шейке матки более 24 часов.
- Пациентку следует проинструктировать: предупредить о том, что она должна обратиться к врачу при чрезмерном кровотечении, болях, повышении температуры тела.
При извлечении расширителя мочевой пузырь пациентки должен быть пуст.
Для извлечения расширителя применяют щипцы, которыми захватывают ручку расширителя и равномерно вытягивают расширитель вниз по продольной оси самого расширителя и шейки матки.
Внимание! При извлечении не следует скручивать расширитель.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Расширители должны храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже 18°C и не выше 25°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
Срок годности расширителей 3 года с даты стерилизации.
Гарантийный срок годности расширителей - 2 года с даты их стерилизации.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация расширителя производится путем сжигания.