

# АмниФлюид

## ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Набор реагентов  
для иммунохроматографического  
выявления протеина-1, связывающего  
инсулиноподобный фактор роста  
в околоплодной жидкости

- ✓ **СОВРЕМЕННЫЙ**
- ✓ **ТОЧНЫЙ 100% результат**
- ✓ **Основан на определении  
маркера ПСИФР-1**
- ✓ **ЭКСПРЕСС-ТЕСТ**  
результат можно оценить  
за несколько минут



# ВОЗЬМИ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ





ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»  
+7 (495) 7887746



WWW.PENTCROFT.RU  
WWW.ARABIN24.RU

# 10%

До **10%** всех доношенных беременностей сопровождаются ПРПО.  
У **2-4%** одноплодных беременностей и до **20%** многоплодных беременностей ПРПО происходит на сроке до **37 недель** беременности

-  У женщин, которым установлен акушерский пессарий или серкляж, повышается секреция влагалищных выделений.
-  У женщин с выкидышами, преждевременными родами в анамнезе вероятность подтекания околоплодных вод выше, что может привести к восходящему инфицированию.

**В таких ситуациях необходимо точно определить почему повысилась влагалищная секреция для определения дальнейшей тактики.**



## НАБОР РЕАГЕНТОВ «АМНИФЛЮД» – ЭКСПРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОДТЕКАНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД


1



### ЗАБОР ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО

Введите тампон во влагалище на глубину 5-7 см и удерживайте в течение 1 минуты

2

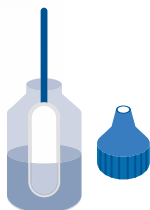

### ЭКСТРАКЦИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО

Поместите тампон в флакон и промойте в растворе в течение 1 минуты

3



### ПОСТАНОВКА ТЕСТА

Нанесите содержимое флакона в тестер АмниФлюд

4



### ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Результат следует считать не позднее, чем через 15 минут постановки теста

# ~100%

определение  
преждевременного  
излития/подтекания  
амниотической  
жидкости

**ВХОДИТ В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ», 2020**



**ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА»**  
**+7 (495) 7887746**



**WWW.PENTCROFT.RU**  
**WWW.ARABIN24.RU**